


製品名		製品番号	
クリーニングホルダー		PD-CTH	同梱製品: PD-CTTU-606501 PD-CTTU-600504
クリーニングアダプタLM		PD-CTAD-LM	
クリーニングアダプタLF		PD-CTAD-LF	
クリーニングアダプタSM		PD-CTAD-SM	
クリーニングアダプタ1T		PD-CTAD-1T	
クリーニングアダプタIN		PD-CTAD-IN	同梱製品: PD-CTTU-150252
クリーニングアダプタHM		PD-CTAD-HM	
クリーニングアダプタWPD		PD-CTAD-WPD	
クリーニングアダプタG		PD-CTAD-G	
クリーニングチューブ6.0/L650		PD-CTTU-606501	
クリーニングチューブ6.0/L50 (4本入)		PD-CTTU-600504	
クリーニングチューブ1.5/L25 (2本入)		PD-CTTU-150252	
EZスプレーメディカルセット		PD-EZ-M	
スリム用スプレーアダプター		P200-EZ-SM	
ボンソー用スプレーアダプター		P200-EZ-BM	
ワイヤーピンドライバー用スプレーアダプター		P200-EZ-WPD	
パナスプレーエックス 6本セット		PD-PSEX-S	

# Cleaning Tool

for Primado2 Attachments

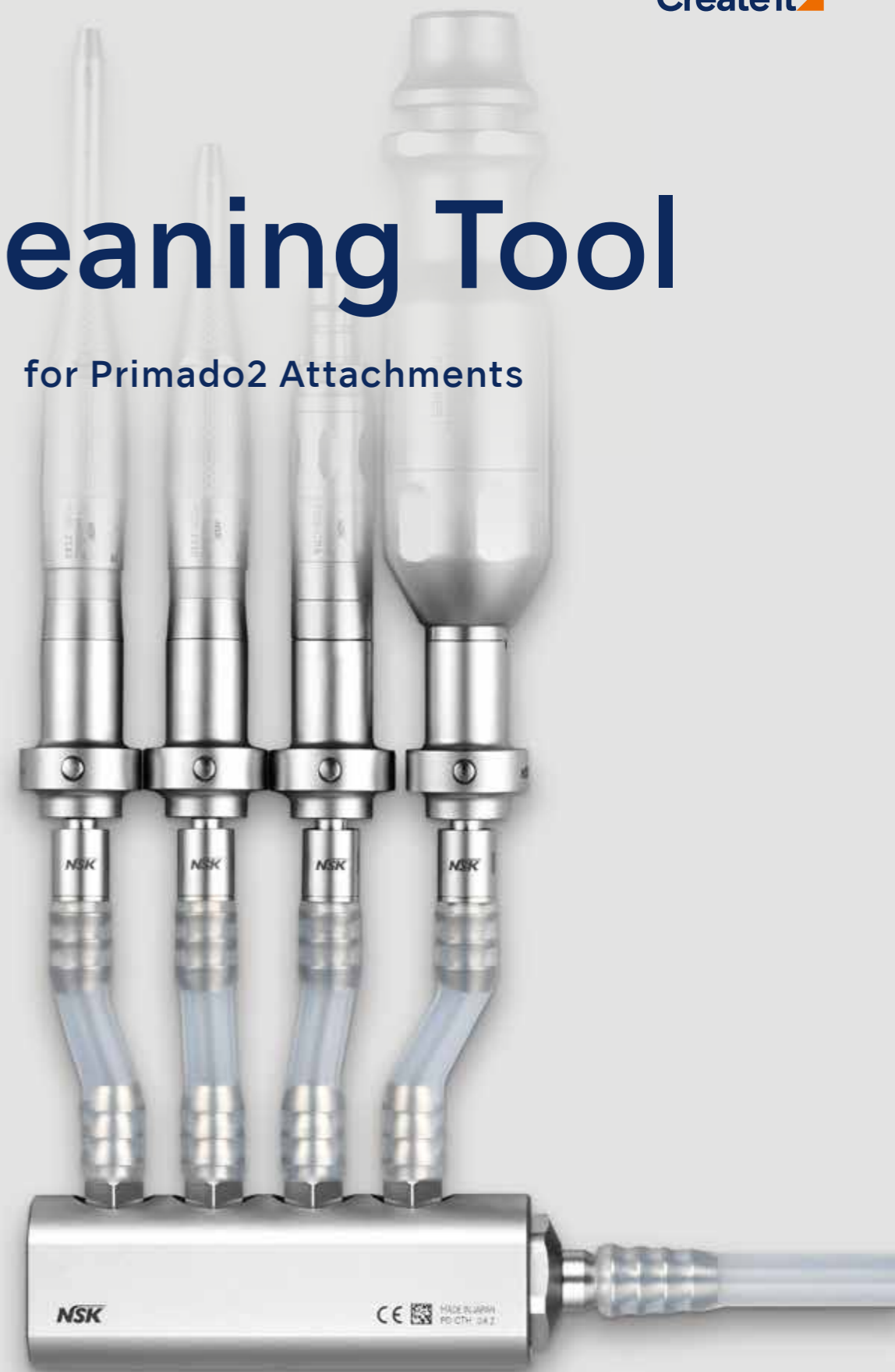

Primado2

## 効果的な内部洗浄

機器の発熱や早期故障のリスクを低減




内部部品の血液汚染

## 特殊設計のクリーニングホルダー


排水部内径の合計を入水部内径よりも小さくすることで、流量のばらつきを最小化

排出部毎の流量の比較\*

● 内腔調整あり ● 内腔調整なし

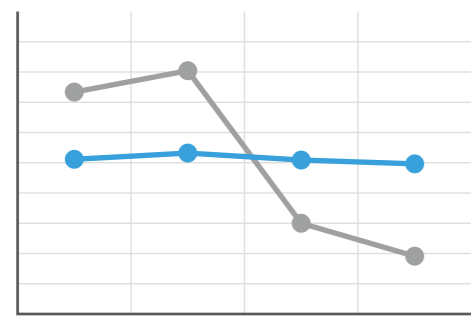

\*社内検証による

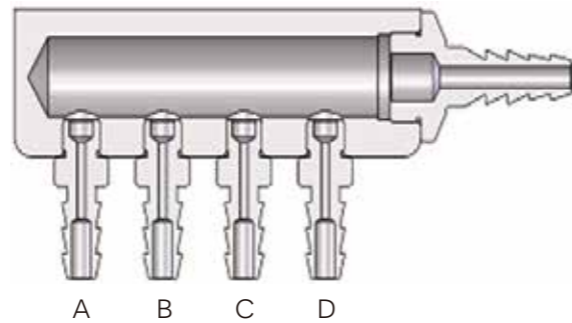

## 自動洗浄/用手洗浄どちらにも対応

充実したラインナップにより、ニーズに合わせた洗浄方法を選択可能



用手洗浄



自動洗浄(ウォッシャーディスインフェクター)



## 用手洗浄手順

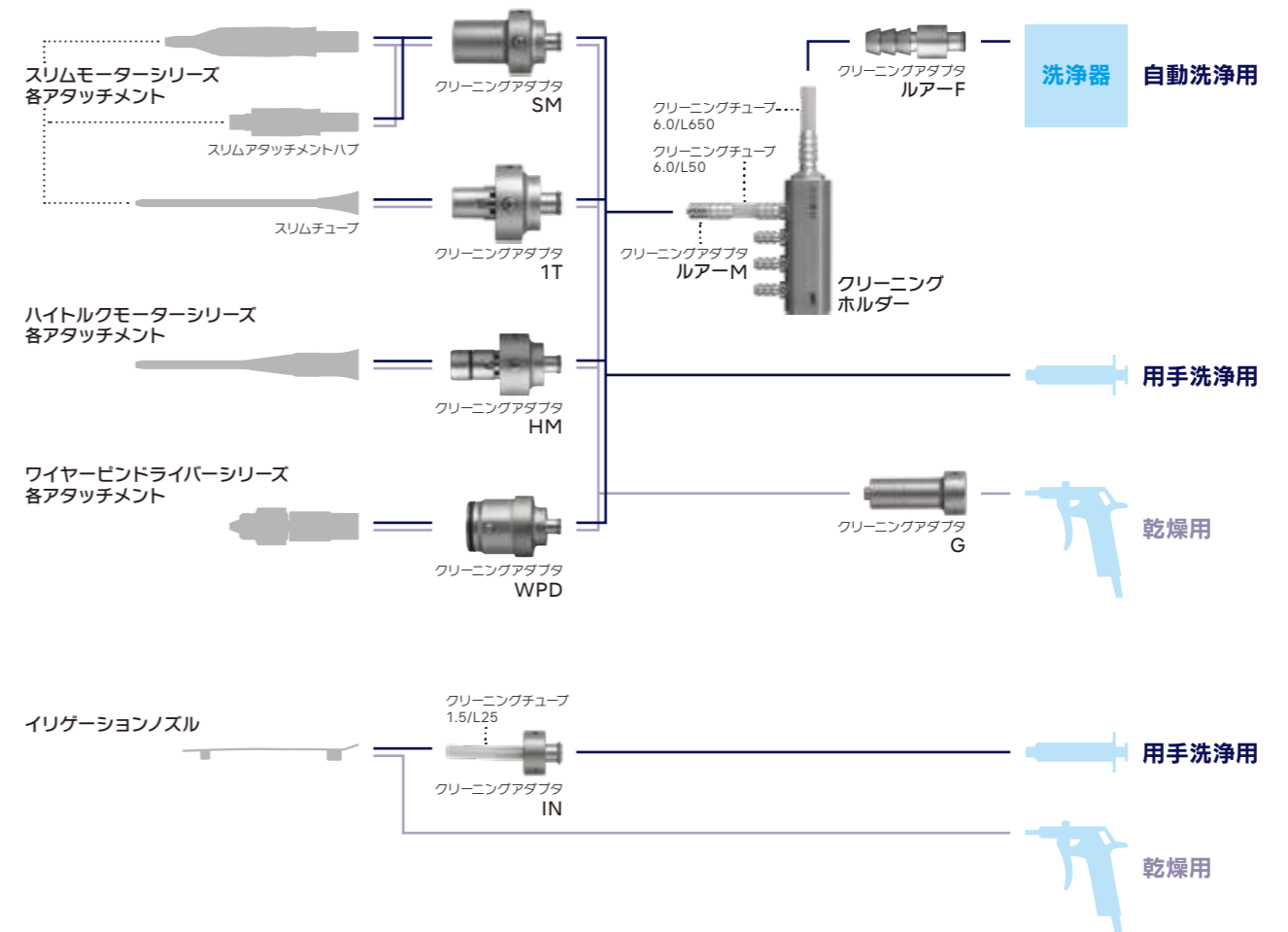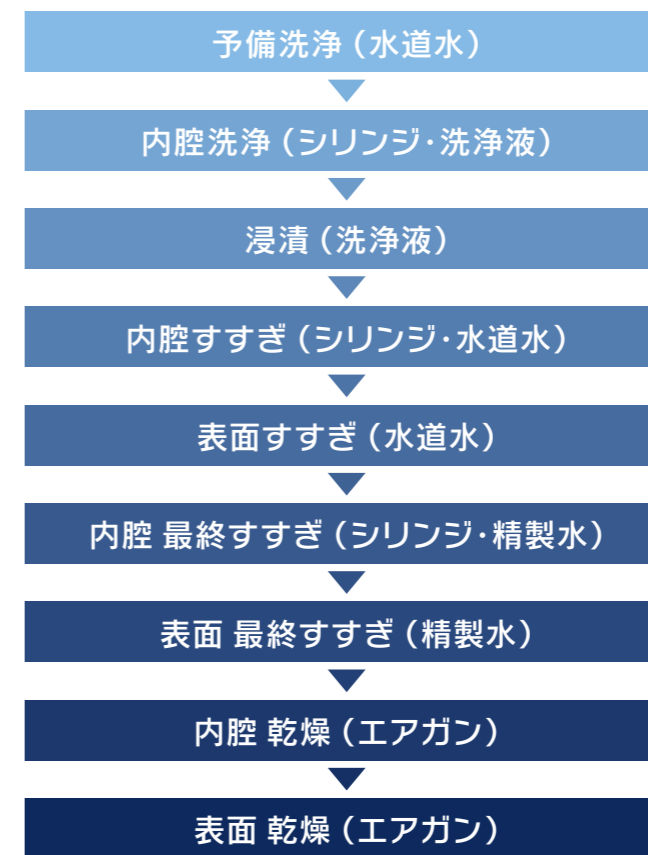

※必ず取扱説明書をお読みください。  
 ※ボーンソーアタッチメントには使用できません。  
 ※クリーニングアダプタINは自動洗浄には使用できません。